

## Viktigt - vänligen läs noggrant

### **Instruktioner för att genomföra och sända kindprover för DNA testning**

För varje hundprov, försäkra er om att numret på ansökningsformuläret överensstämmer med numret på motsvarande kuvert.

Provet får inte tas inom två timmar från det att hunden har ätit.

1. Tre borstar skall användas till varje hund som skall testas.
2. Skriv på kuvertet hundens registreringsnummer och hundens registreringsnamn och ägarens namn- se till att kuvertets nummer stämmer överens med referens numret på ansökningsblanketten.
3. Ta bort plastfickan. Ta ur borstarna från plaströren genom att hålla i det svarta locket och skruva av detta - var försiktig och rör inte borstens topp. Släng tuberna och plastförpackningen.
4. Rulla borstarna bestämt mot insidan av kinden **minst 20 gånger** på varje sida av munnen, försäkra er om att borsten rullas över hela kinden.
5. **Lufttorka borstarna.** Om borstarna inte är helt torra kan bakterier och svamp försämra DNA provet.
6. Placera försiktigt borstarna i det medsända kuvertet. Det är viktigt att borstarna enbart sänds tillbaka i papperskuvertet. Plaströren och plastförpackningen som borstarna kom i skall slängas och får inte användas när borstarna sänds tillbaka.
7. Upprepa steg 2 - 7 med de återstående borstarna.
8. Fyll i ansökningsformuläret för DNA prov vars nummer överensstämmer med numret på kuvertet.
9. Tag ett nytt kuvert (ej medsänt), och stoppa i detta kuvert:
  - Kuvertet som innehåller borstarna
  - Ansökningsformuläret
  - Betalningen i helhet och skicka allt till nedanstående adress

OM PROVTAGNING SKER PÅ MER ÄN EN HUND - SLUTFÖR PROVTAGNINGEN PÅ EN HUND ÅT GÅNGEN INNAN MAN TAR NÄSTA HUND, FÖR ATT UNDVIKA MÖJLIGHETEN ATT PROVERNA BLANDAS I HOP.

Återsänd proverna, det i fyllda ansökningsformuläret och hur ni skall betala (en check utställd på **Animal Health Trust**, postanvisning, kreditkort eller banköverföring till det belopp) som står på ansökningshandlingarna. Provet skall skickas till

**Genetic Services,  
Centre for Preventive Medicine,  
Animal Health Trust  
Kentford  
Newmarket  
Suffolk CB8 7UU.**

**SÄND PROVERNA OMEDELBART EFTER ATT PROVTAGNINGEN ÄR FÄRDIG, VIA FÖRTA KLASS BREV ELLER VIA FLYG POST, FÖR ATT FÖRSÄKRA KVALITÉN PÅ PROVERNA VID ANKOMST TILL ANIMAL HEALTH TRUST.**